

256052 - 256053

1. Před použitím boxu nasadte víko.



2. Po naplnění 80% objemu boxu zaklapněte tlakem bezpečnostní víčko. Dvě polohy víčka – pohotovostní a konečná.



Zářezy ve víčku slouží k sejmutí použitých injekčních jehel bez dotyku lidské ruky.

Přípustná plnicí hmotnost stanovena									
4L	2,4Kg	5L	3Kg	6L	3,6Kg	8L	4,8Kg	10L	5,4Kg

Boxy mohou být plněny odpadem, jehož součástí jsou i zbytky tekutin. Souhrnný obsah tekutin odpadu nesmí přesáhnout 5% z přípustné plnicí hmotnosti. Pokud tuto hranici přesáhne, tak musí být vždy k odpadu přidáno dostatečné množství pohlcující látky. Boxy nezaručují dlouhodobou absolutní těsnost. Před likvidací ponechat v plnicí poloze. Nesmí dojít k mechanickému poškození a deformaci vlastní nádoby nevhodnou manipulací.