

NÁVOD K POUŽITÍ OČNÍ SPRCHY

**APLIKACE:**

Vyplachování ran, mechanické vyplachování očí, vyplachování a čištění ústní dutiny, čištění a oplachování nástrojů a chirurgických zařízení, pooperační zavlažování.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. oční nálevku nasadíte na láhev
2. otočením o 180° uvolníte plastový uzávěr
3. nálevku přiložíte na postižené oko
4. tlakem na láhev vyplachujete do vyprázdnění

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v původním obale, v neotevřeném a nepoškozeném stavu a na suchém místě při teplotě 5 - 25° C. Křehnutí materiálu a plastového obalu zabráníte tím, že nebudete výrobek vystavovat slunečnímu svitu ani UV záření.